




PORTASUERO Y PORTAOXIGENO PARA SILLAS DE RUEDAS DE ACERO

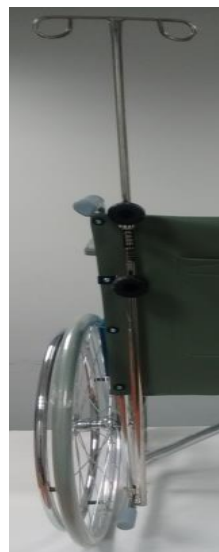

MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Huden, Matricula 4899

Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

Códigos: A722 / A755

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93080 Emisión 1 08/2018



PORTASUERO Y PORTAOXIGENO PARA SILLAS DE RUEDAS DE ACERO



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Importador: Target Medical S.A

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Huden, Matricula 4899

Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

Códigos: A722 / A755

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93080 Emisión 1 08/2018

INTRODUCCION

El portasuero y portatubo de oxígeno **Care-Quip Argentina** han sido diseñados como accesorios de las sillas de ruedas de acero para colgar soluciones o colocar tanques de oxígeno. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, ofreciendo confort y versatilidad al usuario de la silla de ruedas.

Es fundamental leer y entender el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTALACION

Retirar el producto de los envoltorios.

Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación.

Luego de la instalación, comprobar que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su correcta posición.

NOTA: Ver foto como ayuda para la instalación.

Porta oxígeno

- Colocarlo en el caño inferior de la estructura de la silla de ruedas.
- Sujetarlo con las grampas y tornillos al caño de respaldo por encima del eje de la rueda.
- Aflojar las perillas de ajuste para colocar el tanque de oxígeno.

Portasuero

- Sujetarlo con la grampa y tornillos al caño de respaldo por debajo del eje de la rueda.
- Retirar el segundo tornillo del respaldo empezando desde arriba y luego volver a colocarlo a través de la chaveta metálica del portasuero.
- Aflojar la perilla de ajuste para regular la altura.

ADVERTENCIA

Antes de usar el producto, asegurarse siempre de que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su correcta posición. Asegurarse de que no falte ninguna tuerca.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar el inodoro portátil por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparaciones bajo garantía se deberá< presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:.....

Fecha:.....

Firma:..... Aclaración:.....

INTRODUCCION

El portasuero y portatubo de oxígeno **Care-Quip Argentina** han sido diseñados como accesorios de las sillas de ruedas de acero para colgar soluciones o colocar tanques de oxígeno. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, ofreciendo confort y versatilidad al usuario de la silla de ruedas.

Es fundamental leer y entender el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto. El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTALACION

Retirar el producto de los envoltorios.

Leer atentamente las instrucciones antes de realizar la instalación.

Luego de la instalación, comprobar que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su correcta posición.

NOTA: Ver foto como ayuda para la instalación.

Porta oxígeno

- Colocarlo en el caño inferior de la estructura de la silla de ruedas.
- Sujetarlo con las grampas y tornillos al caño de respaldo por encima del eje de la rueda.
- Aflojar las perillas de ajuste para colocar el tanque de oxígeno.

Portasuero

- Sujetarlo con la grampa y tornillos al caño de respaldo por debajo del eje de la rueda.
- Retirar el segundo tornillo del respaldo empezando desde arriba y luego volver a colocarlo a través de la chaveta metálica del portasuero.
- Aflojar la perilla de ajuste para regular la altura.

ADVERTENCIA

Antes de usar el producto, asegurarse siempre de que esté apropiadamente instalado, asegurado y en su correcta posición. Asegurarse de que no falte ninguna tuerca.

MANTENIMIENTO

- Limpiar el producto por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar el inodoro portátil por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparaciones bajo garantía se deberá< presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:.....

Fecha:.....

Firma:..... Aclaración:.....