



## ANDADORES



### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**PM-1813-9**

**Fabricante:**

**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**  
N 1 Pulan Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, CHINA

**Códigos C510 / C512 / C513 / C530 / C562B /  
C562P / C572B / C572P / C601 / C651**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93019 Emisión 2 04/2016**

## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

Los andadores **Care-Quip Argentina** están diseñados para ayudar a caminar. Además proveen soporte y estabilidad adicional a las personas y ayudan a evitar posibles accidentes. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el andador.
- Al utilizar el andador siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia uno mismo y hacia otras personas.
- El andador es un soporte adicional, no debe utilizarse para otro fin que no sea éste.
- El andador debe estar plenamente abierto antes de su uso.
- El andador no se debe usar para subir o bajar escaleras.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto.
- Ajustar las uniones del andador si estuvieran flojas.
- Cambiar los regatones si estuvieran flojos, gastados o dañados.
- No utilizar el andador si los agujeros en las zonas de ajuste estuvieran elongados, o si alguna de las patas estuviera doblada o quebrada.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ANDADORES

Tipos y Códigos	Especificaciones Técnicas	Material de fabricación	Terminación	Color	Regulación de altura (cm)	Ancho total (cm)	Otras especificaciones
Andador chico fijo C510		Aluminio ultraliviano	Anodizado	Natural	60 a 70	56	• Regatones antideslizante
Andador mediano fijo C512		Aluminio ultraliviano	Anodizado	Natural	75 a 85	60	• Regatones antideslizante
Andador grande fijo C513		Aluminio ultraliviano	Anodizado	Natural	85 a 94	60	• Regatones antideslizante
Andador posterior plegable C530		Aluminio ultraliviano	Anodizado	-	45 a 55	-	• Regatones antideslizante
Andador plegable C562B / C562P		Aluminio ultraliviano	Anodizado	Bronce o plateado	78 a 96	60	• Fácil plegado • Regatones antideslizantes • Permite el uso de ruedas como accesorio
Andador plegable articulado C572B / C572P		Aluminio ultraliviano	Anodizado	Bronce o plateado	78 a 96	60	• Fácil plegado • Permite movimiento paso a paso • Regatones antideslizantes • Permite el uso de ruedas como accesorio
Andador plegable con asiento C601		Aluminio ultraliviano	Pintado	Verde	81 a 91	59	• Fácil plegado • Ruedas delanteras fijas • Patas traseras con regatones antideslizante
Andador plegable con asiento, canasto y frenos C651		Aluminio ultraliviano	Pintado	Rojo oscuro	78 a 88	59	• Fácil plegado • Ruedas delanteras giratorias • Ruedas traseras fijas con frenos manuales

## PRESENTACION

La presentación del andador es individual.

## ARMADO Y PLEGADO

CODIGOS C562B / C562P / C572B / C572P

- ARMADO: Tome el andador de las empuñaduras y tire de las mismas hacia a fuera hasta oír un click generado por el botón de traba.
- PLEGADO: Oprima el botón de traba ubicado en el centro del travesaño superior. Tome de las empuñaduras y tire de las mismas hacia adentro hasta su plegado total.

## CODIGO C601

- ARMADO: Tome el andador de las empuñaduras y presione las mismas hacia abajo hasta su apertura total.
- PLEGADO: Tome del caño que es el travesaño superior o caño de respaldo y tire del mismo hacia las empuñaduras hasta su plegado total.

## CODIGO C651

- ARMADO: Tome el andador y ábralo desplazando las patas en direcciones opuestas. Coloque las manijas y fíjelas mediante las perillas provistas. Coloque el respaldo en las ranuras provistas por arriba del asiento hasta oír un click generado por los botones de traba. Enganche el canasto frente al andador o por debajo del asiento.
- PLEGADO: Levante el asiento y tire de la soga hacia arriba. Si el canasto estuviera por debajo del asiento, deberá sacarlo para tirar de la soga.

## USO DEL ANDADOR

Antes de utilizar el andador, regular la altura por medio de los botones de ajuste ubicados en las patas o por medio de las perillas ubicadas en las manijas, según el modelo de andador. La altura óptima permite que el usuario conserve una postura erecta con sus codos ligeramente flexionados. De esta manera el peso del cuerpo descansa sobre el andador al caminar.

### AL LEVANTARSE

Coloque el andador frente a usted.

Incorpórese inclinándose hacia adelante con ambas manos en las empuñaduras del andador.

### AL CAMINAR

Posicione el andador un paso más adelante.

Dé un paso con una de sus piernas, si tuviera una pierna afectada primero con ésta, y luego dé un paso con la otra.

Cuando haya ganado confianza con el uso del mismo, levante y avance con el andador en tramos cortos. Si el andador posee ruedas, simplemente empujelo.

### AL SENTARSE

Posiciónese frente al asiento.

Gire 180° hasta tocar el asiento con la parte posterior de las piernas.

Inclínese hacia adelante y siéntese lentamente.

En caso de los andadores con asiento código C601 y C651, apoyar de forma firme o activar los frenos bajando las palancas, dependiendo del modelo, antes de sentarse.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente el andador con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulando en la estructura del mismo.
- Nunca limpiar el andador con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones del andador no estén flojas.
  - Las patas no estén dobladas, ni quebradas.
  - Las empuñadoras del andador no estén dañadas o rajadas.
  - Los agujeros en la zona de ajuste no estén elongados.
  - Los regatones no estén flojos, rotos o gastados.
- En caso de no utilizar el andador por un largo periodo de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material de la misma.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....