



# LEVANTA PACIENTE HIDRAULICO

## OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matricula 4899

**PM-1813-5**

**Fabricante:**

**Apex Health Care Manufacturing Inc.**

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,  
Chia-Yi Hsien, Taiwán

**Códigos K161**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93027 Emisión 2 04/2016**



## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

El levanta paciente hidráulico **Care-Quip Argentina** está diseñado para asistir a personas que tienen a su cargo el cuidado de pacientes, permitiendo transferirlos con poco esfuerzo. Ayuda a evitar posibles accidentes que les podrían suceder tanto al paciente como a su cuidador.

El levanta paciente debe ser utilizado con un arnés de uso general o específico. El tipo y tamaño de arnés deberá ser seleccionado dependiendo de cada paciente en particular, siendo éste un accesorio del levanta paciente que deberá ser adquirido por separado.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el levanta paciente. El uso incorrecto del levanta paciente podría perjudicar al mismo, al usuario y/o cuidador.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el levanta paciente.
- Al utilizar el levanta paciente siempre tenga presente los riesgos de lesiones hacia el usuario, cuidador y otras personas.
- El levanta paciente es un mecanismo de transferencia, no debe usarse para transportar al paciente de una habitación a otra.
- Antes de levantar al paciente, asegurarse de extender las patas de la base a la posición más abierta y que los frenos de las ruedas estén activados. De lo contrario, podría tumbarse el levanta paciente.
- Respete el peso máximo admitido del levanta paciente.
- Para pacientes espásticos o muy discapacitados usar cinturones de seguridad o de restricción.
- Para ajustar o aflojar la perilla de la bomba poner la manivela de esta en posición neutral (paralela a la bomba). No tiene que estar en la posición que figura en la foto de la portada, ya que puede generar el daño o rotura de la bomba.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DEL LEVANTA PACIENTE HIDRAULICO

- Capacidad para levantar y transferir pacientes de hasta 150 kg.
- Apertura y cierre de las patas de 63 a 105 cm.
- Altura de 65 a 175 cm.
- Peso total 43 kg.
- Estructura de acero tubular de 50 cm de diámetro.
- Base montada sobre cuatro ruedas giratorias de 10 cm.
- Ruedas posteriores con frenos.

## PRESENTACION

La presentación del levanta paciente hidráulico es individual, embalado en una caja de cartón, que incluye:

Base con 4 ruedas giratorias de 10 cm, con freno en las ruedas posteriores	X 1
Columna	X 1
Bomba hidráulica	X 1
Soporte de arnés con giro de 360°	X 1
Manijas para empujar y/o conducir el levanta paciente	X 1
Manivela para la apertura y cierre de las patas del levanta paciente	X 1
Manual de uso	X 1

## ARMADO DEL LEVANTA PACIENTE HIDRAULICO

- No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.
- Quitar la traba para retención de columna en la base del levanta paciente.
- Quitar los tornillos de la columna del levanta paciente.
- Colocar la columna en la base orientada hacia adelante, en la misma dirección que las patas.
- Colocar la traba y los tornillos, anteriormente quitados, para asegurar que la columna y la base queden bien acopladas.
- Colocar las manijas en la columna con los tornillos provistos.
- Colocar el soporte de arnés en la columna del levanta paciente, en el extremo opuesto a la base, mediante la traba para retención.
- Colocar la manivela en la boquilla ubicada por detrás de la base.

## USO DEL LEVANTA PACIENTE HIDRAULICO

- Extender las patas de la base a la posición más abierta, mediante la manivela de apertura y cierre de patas.
- A fin de levantar el paciente fácil y cómodamente, tenga listo y en posición el levanta pacientes, el arnés de uso general o específico y el inodoro portátil o la silla de ruedas en caso de transferir al paciente a la misma.
- Colocación del arnés:
  - El paciente debe estar en el centro de la cama.
  - Rotar el paciente hacia un lado.
  - Colocar el arnés correspondiente sobre la cama.
  - Rotar el paciente hacia el centro de la cama.
  - Centrar el paciente sobre el arnés.

- Girar la perilla de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj hasta aflojarla completamente y bajar el extremo de la columna.
- Colocar las tiras del arnés en el soporte.
- Trabar los frenos traseros del levanta paciente.
- Girar la perilla de la bomba en sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustada.
- Operar la manivela de la bomba para levantar el paciente, hasta que su cuerpo cuelgue mediante el arnés.
- Destrobar los frenos de las ruedas traseras.
- Transferir el levanta paciente hasta y por encima del inodoro o la silla de ruedas.
- Accionar los frenos de levanta pacientes, y los frenos del inodoro portátil o de la silla de ruedas si corresponde.
- Girar la perilla de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj hasta aflojarla completamente para bajar al paciente en forma gradual.
- Asistir al paciente durante el descenso para que quede sentado en una postura correcta.
- Cuando se transfiera el paciente a una silla de ruedas:
  - Una vez sentado el paciente, desenganchar las tiras del soporte de arnés. El arnés se puede dejar por debajo del paciente.
- Cuando se transfiera el paciente para el uso del inodoro:
  - Sacar o mover la ropa del paciente antes de levantarlo con el levanta paciente. Mantener las tiras del arnés bien tensas y asegurarse que el paciente esté en una posición cómoda y correcta.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente el levanta paciente con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulando en la estructura del mismo.
- Nunca limpiar el levanta paciente con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el levanta paciente sea inspeccionado antes de cada uso.
- Todas las tuercas, trabas y bulones deben estar ajustados.
- Cuando estén activados los frenos de las ruedas el levanta paciente no debe moverse.
- Cuando no estén activados los frenos de las ruedas el levanta paciente debe moverse con facilidad.
- Operar la bomba hidráulica para asegurarse que funcione correctamente.
- Operar la manivela para la apertura y cierre de las patas del levanta paciente para asegurarse que funcione correctamente.
- La lubricación periódica de las piezas móviles extenderá la vida útil del levanta paciente. Utilizar lubricante en aerosol y limpiar cualquier exceso del mismo, caso contrario, se fomentará la acumulación de polvo en ésta zona.
- Antes del primer uso, y luego periódicamente lubrique en:
  - La articulación de la columna.
  - Los ejes de las ruedas.
  - La unión de la columna con el soporte de arnés.
  - La unión de la bomba con su manivela.
  - La unión de la columna con la bomba.
  - Las articulaciones de la base.
- En caso de no utilizar el levanta paciente por un largo periodo de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (meses) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.**

**Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.**

**En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.**

**La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.**

**Casa vendedora:** .....

**Fecha:** .....

**Firma:** ..... **Aclaración:** .....