



**OTRA INFORMACION:**

**Importador: Target Medical S.A**

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Huden, Matricula 4899**

**PM-1813-9**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**  
N1 Pulan Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, CHINA

**Códigos C530**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**



# **ANDADOR PEDIATRICO POSTERIOR**



## **MANUAL DE USO**

## INTRODUCCION

El andador de **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para ayudar en la movilidad en un usuario individual y es apto para el uso diario. El uso adecuado dara como resultado un producto duradero, manteniendo la buena relación precio-calidad, ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del producto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar el andador.
- Al utilizar el andador siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia uno mismo y hacia otras personas.
- El andador es un soporte adicional, no debe utilizarse para otro fin que no sea este.
- El andador debe estar plenamente abierto antes de su uso.
- El andador no se debe usar para subir o bajar escaleras.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente en busca de cualquier defecto.
- Ajustar las uniones del andador si estuvieran flojas.
- Cambiar las ruedas si estuvieran flojas, gastadas o dañadas.
- No utilizar el andador si los agujeros en las zonas de ajuste estuvieran elongados, o si alguna de las patas estuviera doblada o quebrada.
- Sujetar fuertemente el andador por las empuñaduras para no correr riesgo de caer contra el andador.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ANDADORES

Especificaciones Técnicas	Material de fabricación	Terminación	Color	Regulación de altura (cm)	Ancho total (cm)	Otras especificaciones
Tipo y Códigos						
Andador posterior plegable C530	Aluminio ultraliviano	Anodizado	Plateado	45 a 55	36	• Ruedas antiretroceso

## PRESENTACION

La presentación del andador es individual.

## ARMADO Y PLEGADO

CODIGO C530

- **ARMADO:** Colocar las patas del andador en los caños de la estructura con el mismo número hasta que traben en un agujero.
- **PLEGADO:** Tome el andador y ciérrelo apretando los botones de las patas moviéndolo hacia atrás.

## USO DEL ANDADOR

Antes de utilizar el andador, regule la altura por medio de las trabas ubicadas en las patas. La altura óptima permite que el usuario conserve una postura erecta con los codos ligeramente flexionados.

De esta manera el peso del cuerpo descansa sobre el andador al caminar y el usuario no hará esfuerzo innecesario con los hombros al desplazarse.

El andador C530 se recomienda para usuarios con una altura entre 0.80– 1.00 metro.

- **AL LEVANTARSE**  
Coloque el andador delante de usted.  
Incorpórese y gire sobre su cuerpo hasta que quede el andador detrás suyo.
- **AL CAMINAR**  
Posicione el andador más adelante.  
De un paso con una de sus piernas, si tuviera una pierna afectada primero con esta, y luego de un paso con la otra.
- **AL SENTARSE**  
Posiciónese frente al asiento.  
Gire 180° su cuerpo, hasta que el asiento quede a su espalda y el andador delante, luego siéntese lentamente.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente el andador con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulado en la estructura del mismo.
- Nunca limpiar el andador con productos abrasivos, amoniacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que el andador sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones del andador no estén flojas.
  - Las patas no estén dobladas, ni quebradas.
  - Las empuñaduras del andador no estén dañadas o rajadas.
  - Los agujeros en la zona de ajuste no estén elongados.
  - Las ruedas no estén flojas, rotas o gastadas.
- En caso de no utilizar el andador por un largo periodo de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.**

**Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descriptas en este manual o reparaciones por personal no autorizado.**

**En caso de requerir reparaciones bajo garantía se deberá< presentar este certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.**

**La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.**

**Casa vendedora:**.....

**Fecha:**.....

**Firma:**..... **Aclaración:**.....