



## BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matrícula 4899

**Fabricante: Apex Health Care Mfg., Inc.**

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,  
Chia-Yi Hsien, Taiwán.

**Código I104**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93021 Emisión 2 04/2016**



## BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matrícula 4899

**Fabricante: Apex Health Care Mfg., Inc.**

20 Industrial 3rd Road, Tou Chiao Industrial Park, Ming Hsiung Shiang,  
Chia-Yi Hsien, Taiwán.

**Código I104**


**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93021 Emisión 2 04/2016**

### BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA

Las barandas **Care-Quip Argentina** han sido diseñadas para brindar seguridad y evitar accidentes de usuarios de camas. Fabricadas en acero cromado con soportes regulables entre 87 y 99 cm de ancho, adaptable a la mayoría de las camas. Laterales telescópicos extensibles entre 110 y 185 cm. Altura regulable en 2 posiciones, medidas de tubo superior a lecho de la cama de 14 a 37 cm. Incluye 4 (cuatro) precintos.

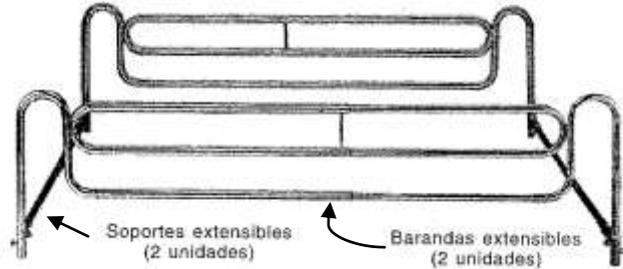

### INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Retirar el colchón.
2. Colocar un soporte extensible cerca de la cabecera de la cama y el otro cerca de la piecera. Para colocar cada soporte debe ser comprimido hasta poder enganchar ambos extremos del mismo en los laterales de la cama. Para mayor seguridad o en camas que sean necesarias, sujetar con precintos de plásticos los soportes a los laterales de las camas.
3. Extender las barandas hasta que alcancen el largo requerido y colocarlas en los extremos de los soportes. Tirar de las trabas de los extremos del soporte hacia afuera para permitir el correcto ensamblado.
4. Regular la altura o desmontar las barandas tirando de las trabas de los soportes hacia afuera.
5. Colocar nuevamente el colchón.

### ADVERTENCIA

Para mayor seguridad las barandas telescópicas se deben colocar entre el colchón y los elásticos de la cama. No se deben colocar por debajo de los elásticos de la cama. Al momento de armado o regulación de las barandas telescópicas tener cuidado con el soporte extensible para no lastimarse.

### MANTENIMIENTO

- Limpiar las barandas telescópicas por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar las barandas con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado las barandas telescópicas, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar las barandas telescópicas por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.


Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

### BARANDAS TELESCÓPICAS PARA CAMA

Las barandas **Care-Quip Argentina** han sido diseñadas para brindar seguridad y evitar accidentes de usuarios de camas. Fabricadas en acero cromado con soportes regulables entre 87 y 99 cm de ancho, adaptable a la mayoría de las camas. Laterales telescópicos extensibles entre 110 y 185 cm. Altura regulable en 2 posiciones, medidas de tubo superior a lecho de la cama de 14 a 37 cm. Incluye 4 (cuatro) precintos.

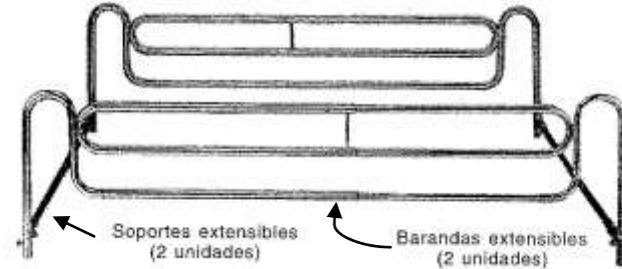

### INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Retirar el colchón.
2. Colocar un soporte extensible cerca de la cabecera de la cama y el otro cerca de la piecera. Para colocar cada soporte debe ser comprimido hasta poder enganchar ambos extremos del mismo en los laterales de la cama. Para mayor seguridad o en camas que sean necesarias, sujetar con precintos de plásticos los soportes a los laterales de las camas.
3. Extender las barandas hasta que alcancen el largo requerido y colocarlas en los extremos de los soportes. Tirar de las trabas de los extremos del soporte hacia afuera para permitir el correcto ensamblado.
4. Regular la altura o desmontar las barandas tirando de las trabas de los soportes hacia afuera.
5. Colocar nuevamente el colchón.

### ADVERTENCIA

Para mayor seguridad las barandas telescópicas se deben colocar entre el colchón y los elásticos de la cama. No se deben colocar por debajo de los elásticos de la cama. Al momento de armado o regulación de las barandas telescópicas tener cuidado con el soporte extensible para no lastimarse.

### MANTENIMIENTO

- Limpiar las barandas telescópicas por lo menos una vez por semana, con un paño suave y húmedo, quitando el polvo que pueda estar acumulado.
- Nunca limpiar las barandas con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de haber mojado las barandas telescópicas, secar completamente con un paño suave lo antes posible y dejar en un lugar cálido y seco, hasta asegurarse de haber logrado un secado total.
- En caso de no utilizar las barandas telescópicas por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....