



ARNES DE 5 PUNTOS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Código A780

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93011 Emisión 2 04/2016



ARNES DE 5 PUNTOS



MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

Fabricante: Target Medical S.A.

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Director Técnico:

Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899

Código A780

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

93011 Emisión 2 04/2016

INTRODUCCION

El arnés de 5 puntos **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para contener a personas discapacitadas que deban permanecer sentadas en forma segura en una silla de ruedas. La pechera es de tela símil neoprene doble capa y las correas son regulables en largo. El arnés viene en talla único y son adaptables a todas las sillas de ruedas. La silla de ruedas se puede plegar con el arnés colocado.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del arnés podría perjudicar al mismo y/o al usuario.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE COLOCACION

1. Sentar al usuario.
2. Colocar la correa más corta en la cruzeta de la silla de ruedas mediante la hebilla. Abrochar el otro extremo de la correa a la pechera.
3. Abrochar las otras dos correas en las hebillas superiores de la pechera, cruzar las correas por la parte posterior del respaldo y pasarlas por el apoyabrazos hasta abrochar en la hebilla correspondiente.
4. Regular el largo de las correas según el usuario.



ADVERTENCIA

Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

No es un arnés para trabajos en altura.

La correa de la entepierna siempre debe estar colocada.

Las correas deben estar reguladas según el usuario para evitar accidentes.

MANTENIMIENTO



Lavar a mano con agua fría y jabón neutro.



No utilizar cloro ni lavandina.



No planchar.



Secar a la sombra.



No secar en máquina ni centrifugar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración:

INTRODUCCION

El arnés de 5 puntos **Care-Quip Argentina** ha sido diseñado para contener a personas discapacitadas que deban permanecer sentadas en forma segura en una silla de ruedas. La pechera es de tela símil neoprene doble capa y las correas son regulables en largo. El arnés viene en talla único y son adaptables a todas las sillas de ruedas. La silla de ruedas se puede plegar con el arnés colocado.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

El uso incorrecto del arnés podría perjudicar al mismo y/o al usuario.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

INSTRUCCIONES DE COLOCACION

1. Sentar al usuario.
2. Colocar la correa más corta en la cruzeta de la silla de ruedas mediante la hebilla. Abrochar el otro extremo de la correa a la pechera.
3. Abrochar las otras dos correas en las hebillas superiores de la pechera, cruzar las correas por la parte posterior del respaldo y pasarlas por el apoyabrazos hasta abrochar en la hebilla correspondiente.
4. Regular el largo de las correas según el usuario.



ADVERTENCIA

Lea detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

No es un arnés para trabajos en altura.

La correa de la entepierna siempre debe estar colocada.

Las correas deben estar reguladas según el usuario para evitar accidentes.

MANTENIMIENTO



Lavar a mano con agua fría y jabón neutro.



No utilizar cloro ni lavandina.



No planchar.



Secar a la sombra.



No secar en máquina ni centrifugar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora:

Fecha:

Firma: Aclaración: