



## COLCHON ORTOPEDICO

### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, Monte Grande 1842, Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden**, Matricula 4899

**Fabricante: Foshan Shunde Kangshen Medical Equipment Industry Co Ltd.**

Xinlu Industrial Area Bijiang Neighbourhood Committee Beijiao Town, Shunde District  
Foshan City, China.

**Códigos: I621, I622, I631, I632.**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**



## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

Los colchones ortopédicos **Care-Quip Argentina** están diseñados para el uso en camas ortopédicas por su articulación de 4 secciones. Genera la comodidad de un usuario individual de hasta 120 kg de peso, es de fácil traslado por su bajo peso y apto para uso diario. La gama de colchones está compuesta por los siguientes códigos:

- I621 Colchón de espuma, funda de PVC, medidas: 195 x 84 x 10 cm.
- I622 Colchón de espuma, funda de PU, medidas 195 x 84 x 10 cm.
- I631 Colchón de espuma, funda de PVC, medidas: 195 x 84 x 12 cm.
- I632 Colchón de espuma, funda de PU, medidas: 195 x 84 x 12 cm.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el colchón. El uso incorrecto podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer atentamente el manual de usuario antes de usar el colchón.
- No utilizar el colchón para otro uso que no sea el previsto en este manual.
- Al utilizar el colchón siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y otras personas.
- El colchón es para el uso de un solo usuario.

## CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COLCHON

- Peso máximo sugerido del usuario 120 kg.
- Densidad promedio 25 Kg/m<sup>3</sup>.
- Articulación en 4 secciones.
- Mediante el uso del colchón, los sistemas eléctricos y/o mecánicos que accionan la cama realizan un menor esfuerzo y alargan la vida útil de los mismos.
- Peso aproximado del colchón 6,5 kg.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente la funda del colchón con un paño suave o una esponja humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulado en la misma.
- Nunca limpiar el cochón ni la funda con diluyentes, solventes o abrasivos, aun cuando se tenga que eliminar una mancha difícil.
- Inspeccionar en búsqueda de cualquier desperfecto que pudiera comprometer la integridad del colchón y su correcto funcionamiento.
- En caso de no utilizar el colchón por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.**

**Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.**

**En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.**

**La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.**

**Casa vendedora:** .....

**Fecha:** .....

**Firma:** ..... **Aclaración:** .....