



## GOMA MACIZA PARA RUEDA DE 55 CM



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

**Código A838**

93034 Emisión 2 04/2016



## GOMA MACIZA PARA RUEDA DE 55 CM



### MANUAL DE USO

#### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**

N 1 Puland Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, China

**Código A838**

93034 Emisión 2 04/2016

## INTRODUCCION

La goma maciza **Care-Quip Argentina** está diseñado para las ruedas de 55 cm.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## INSTRUCCIONES DE COLOCACION

La goma maciza cuenta con un diametro ajustado para evitar su descalce involuntario a traves del tiempo, por lo cual debe ser colocada con una maquina especial que estire y calce la misma de manera uniforme.

Por este motivo, **Care-Quip Argentina de Target Medical S.A.** no puede ofrecer garantía ni aceptar responsabilidades sobre este producto.

La colocación manual es extremadamente dificultosa y no está recomendada ya que podría provocar la rotura de la goma y riesgo de accidentes al colocador.

La colocación manual de la goma maciza está bajo entera responsabilidad del colocador, se sugiere que el trabajo lo realicen por lo menos entre dos o más personas. Se debe lubricar mínimamente la llanta con detergente, estirar la goma y calzarla de manera uniforme sin utilizar ningún tipo de herramienta que pueda llegar a marcar la misma. Una pequeña marca provocaría un punto de rotura debido a la tensión de la goma.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar la goma maciza con un paño suave y húmedo, quitando la suciedad que pueda estar acumulada.
- Nunca limpiar la goma maciza con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar la goma maciza por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## INTRODUCCION

La goma maciza **Care-Quip Argentina** está diseñado para las ruedas de 55 cm.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el producto.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## INSTRUCCIONES DE COLOCACION

La goma maciza cuenta con un diametro ajustado para evitar su descalce involuntario a traves del tiempo, por lo cual debe ser colocada con una maquina especial que estire y calce la misma de manera uniforme.

Por este motivo, **Care-Quip Argentina de Target Medical S.A.** no puede ofrecer garantía ni aceptar responsabilidades sobre este producto.

La colocación manual es extremadamente dificultosa y no está recomendada ya que podría provocar la rotura de la goma y riesgo de accidentes al colocador.

La colocación manual de la goma maciza está bajo entera responsabilidad del colocador, se sugiere que el trabajo lo realicen por lo menos entre dos o más personas. Se debe lubricar mínimamente la llanta con detergente, estirar la goma y calzarla de manera uniforme sin utilizar ningún tipo de herramienta que pueda llegar a marcar la misma. Una pequeña marca provocaría un punto de rotura debido a la tensión de la goma.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar la goma maciza con un paño suave y húmedo, quitando la suciedad que pueda estar acumulada.
- Nunca limpiar la goma maciza con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- En caso de no utilizar la goma maciza por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.