



## INODOROS PORTATILES

### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires,  
Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: R. Poon Medical Products (Mingguang) Co., Ltd.**

Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province 528000, R.O.C.,  
China

**Códigos D312P / D315P / D316 / D318 / D336P**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

**93048 Emisión 3 12/2017**



D312P



D315P



D316



D317P



D318



D336P

## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

Los inodoros portátiles **Care-Quip Argentina** han sido diseñados para facilitar el uso sanitario e higienizado de usuarios que presentan problemas de movilidad. Además proveen soporte y estabilidad adicional ayudando a evitar posibles accidentes. Los mismos han sido diseñados para un usuario individual de hasta 140 kg, según código. Los inodoros portátiles son aptos para uso diario en baños y habitaciones. Todos los inodoros portátiles incluyen bacinilla plástica.

El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario para la solución de problemas de movilidad.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro portátil. El uso incorrecto del inodoro portátil podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro portátil.

Al utilizar el inodoro portátil siempre tenga presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas.

Al movilizar el inodoro portátil con ruedas siempre permanezca alerta para evitar choques u otras situaciones peligrosas, especialmente al movilizarlo por zonas estrechas.

No utilizar el inodoro portátil para otro uso que no sea el de facilitar el uso sanitario e higienizado de usuarios que presentan problemas de movilidad.

No sobrecargar el inodoro portátil. Respetar el peso máximo admitido según código.

No permitir que los niños jueguen con el inodoro portátil ó se cuelguen del mismo.

Al sentarse y levantarse del inodoro portátil con ruedas, asegurarse que los frenos estén activados.

## USO DEL INODORO PORTATIL

Antes de utilizar el inodoro portátil regulable en altura, ajustar la altura de las cuatro patas. La medida correcta del inodoro portátil permite que el usuario conserve una postura segura al sentarse.

Antes de sentarse o levantarse del inodoro portátil con ruedas, comprobar que los frenos de las ruedas traseras se encuentren activados.

Al sentarse en el inodoro portátil girar sobre sí mismo, hasta tocar el inodoro portátil con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Al estar sentado en el inodoro portátil no intentar alcanzar objetos fuera de su alcance. Estirarse solamente hasta donde lleguen los brazos sin cambiar la posición de sentado.

No trasladar el peso ni cambiar la posición de sentado por cuanto el inodoro portátil podría tumbarse.

Al levantarse del inodoro portátil inclinarse hacia adelante con ambas manos en los apoyabrazos e incorporarse lentamente.

## MANTENIMIENTO

Luego del higienizado del usuario, secar completamente el inodoro portátil mediante un paño suave.

Limpiar y desinfectar el inodoro portátil por lo menos una vez por semana. Las ruedas, demás partes metálicas y plásticas pueden ser limpiadas con una esponja ligeramente embebida en agua y detergente inocuo.

Nunca limpiar el inodoro portátil con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

Todas las tuercas y tornillos del inodoro portátil deben estar ajustados.

Comprobar que al activar los frenos en el inodoro portátil con ruedas, éste no debe moverse.

Comprobar que al desactivar los frenos en el inodoro portátil con ruedas, éste debe moverse con facilidad.

Las ruedas del inodoro portátil son vulnerables al desgaste. Se recomienda reemplazar las cuatro ruedas al mismo tiempo para evitar que el mismo pierda estabilidad.

Es importante que el inodoro portátil sea inspeccionado regularmente, y asegurarse que:

- Las uniones del inodoro portátil no estén flojas.
- Las patas no estén dobladas, ni quebradas.
- Los agujeros en la zona de ajuste de las patas no estén elongados.
- Los regatones no estén flojos, rotos o gastados.
- Las ruedas no estén gastadas o dañadas

En caso de no utilizar el inodoro portátil por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.**

**Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.**

**En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.**

**La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.**

**Casa vendedora:** .....

**Fecha:** .....

**Firma:** ..... **Aclaración:** .....